



# 3FMASK SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR DPI III CATEGORIA

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Prodotta totalmente in Italia, tra le poche in camera bianca ISO 8, che risponde alle direttive UNI EN149:2001+A1:2009, certificata da un Laboratorio Accredia ed è marcata CE0161.

La forma, dal design ergonomico a "becco" protegge totalmente la bocca, mentre morbidezza, leggerezza e longevità di impiego (ben otto ore di efficacia) permettono di coprire con un solo dispositivo un intero turno di lavoro. Comodo, poi, il sistema di tenuta di 3FMask che non tira le orecchie e ripartisce la trazione tra occipite e nuca grazie al sottile elastico sdoppiabile.

La semimaschera FFP2 3Fmask è un dispositivo di protezione individuale capace di filtrare oltre il 95% delle microparticelle sospese nell'aria. Protegge il personale che opera nelle strutture sanitarie e non sanitarie dagli agenti patogeni trasmissibili per via aerea, batteri, virus, allergeni, nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri agenti contaminanti. Assicura un ottimo livello di aderenza e comfort, adattabile alle diverse conformazioni facciali, grazie al supporto nasale regolabile incluso e ai due elastici nucali regolabili che danno la possibilità di non applicarli sulle orecchie. La 3FMask è compatibile con altri DPI (occhialini, visiere, etc.), per cui non perde la sua efficacia protettiva.

## DETTAGLI TECNICI

Materiale (4 strati):

1. **Superficie esterna:** Polipropilene Spunbond
2. **Filtro:** Polipropilene Meltblown
3. **Filtro:** Polipropilene Meltblown
4. **Superficie interna:** Polipropilene Spunbond

**Dimensioni (cm):** 24x9 (+ 0,5).

**Tipologia:** FFP2 NR Senza valvola monouso

**Misura:** Taglia unica

**Standard di filtrazione:** UNI EN149:2001+A1:2009

**Condizioni di conservazione:** Mantenere in condizioni buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

**Shelf-life:** 3 anni dalla data di produzione.

<b>ISTRUZIONI D'USO</b>	<p>1) lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica.</p> <p>2) Indossare la mascherina toccando solo gli elastici e facendo attenzione di non toccare la parte interna.</p> <p>3) Posizionare la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto al mento, accertarsi di averla indossata nel verso giusto. Durante l'uso se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici e se durante l'uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l'igiene delle mani, non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili.</p> <p>4) Gettare la mascherina usata nei rifiuti indifferenziati.</p> <div data-bbox="414 515 1468 728"></div>
<b>AVVERTENZE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le semimaschere filtranti sono dispositivi monouso e non vanno mai riutilizzate.</li><li>2. Per non danneggiare il materiale filtrante, non pulire il prodotto con acqua.</li><li>3. Conservare in ambiente non inquinato, privo di umidità e lontano da fonti di calore.</li><li>4. Se correttamente utilizzate, le semimaschere filtranti non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori.</li><li>5. Non utilizzare i dispositivi se la confezione è danneggiata.</li><li>6. Quando la semimaschera filtrante diventa umida o alterata deve essere sostituita.</li></ol>